



The original
GALLANT
DISPOSABLE PREP RAZORS

Gallant Disposable Prep Razor är förpackade i en dispenserbox som innehåller 50 x omslagsskyddade rakhyvlar. De främsta egenskaperna är:

- Fingerspetskontroll genom greppkanter på handtaget.
- Handtaget är placerat framför bladet och kräver endast ett försiktigt drag.
- Optimal vy över rakningsområdet.
- Teflon (PTFE) och CrN belagt rakblad för mjuk och jämn rakning.
- Speciellt utvecklad rakbladfacett för effektiv och säker rakning.

1

Ta ut en rakhyvel från dispenserboxen.
Dra försiktigt av omslagsskyddet.




2

Placera rakhyveln över rakningsområdet.
Använd inget tryck på rakhyveln.
Flytta rakhyveln försiktigt över huden.



3

Efter användning, håll rakhyveln upprätt
mot en plan yta och tryck försiktigt tills
handtaget snäpper. Rakhyveln är nu säkert
inaktiverad.

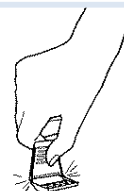

4

Plasthandtaget kan återvinnas och rakblads
komponenten kan samlas i en medicinsk
säkerhetsbehållare.



Gallant Disposable Prep Razor är registrerad och regleras enligt nedan:

- EU MDR 2017/745, MDR class1, UDI-DI 7391100000018,
- EU SRN: SE-MF-000005617
- US Food and Drug Administration, reg.no.: 3009143236
- MHRA UK Reg.No.: 2021121301226985
- India CDSCO Voluntary Reg.No.: Konsul-SWE/I/MD/005150